



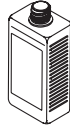

assistina

Týdenní kontrola



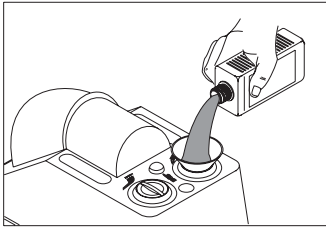


Zkontrolujte množství kapaliny! Doplňte chybějící!


Servisní olej
500 ml – 02675910

Čistící tekutina
1000 ml – 02680210


Set 02680500:
1000 ml čisticí tekutiny a 500 ml servisního oleje

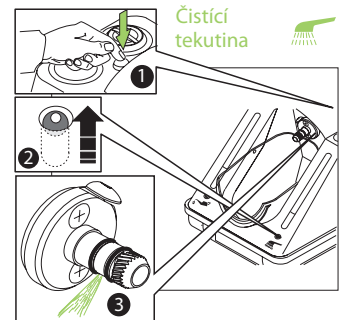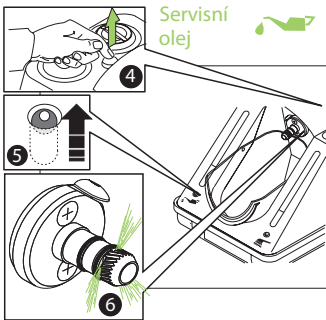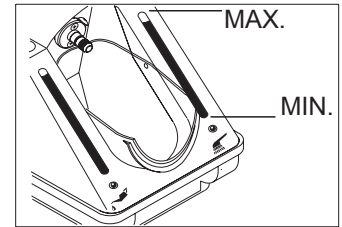

Zkontrolujte funkčnost!

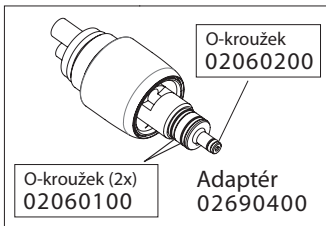


Zkontrolujte o-kroužky! Prověřte správnou pozici a / nebo poškození!

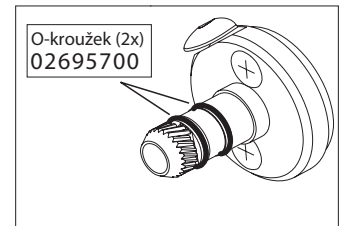



Obecné rady




Při údržbě po každém pacientovi - Stiskněte tlačítko programu jednou!
Při údržbě dvakrát za den - Stiskněte tlačítko programu dvakrát!

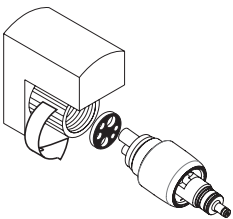

Ověřte pevnost připojení!

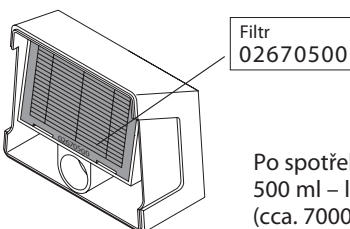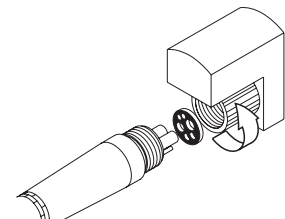

Výměna filtrů!

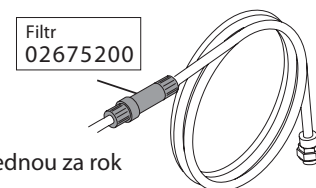

Po spotřebování jedné
500 ml – lahve servisního oleje
(cca. 7000 cyklů)

Jednou za rok

VÝROBCE:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

PRODEJCE:

Dentamechanik, s.r.o.
U Pily 581
370 01 Česká Budějovice

t + 420 386 351 165
f + 420 386 360 114
info@dentamechanik.cz
www.dentamechanik.cz